




女性の心とカラダをととのえる

冷温兼用のジェルを使用し、子宮、背中、首、肩、手首、足首、胸などを冷やしたり温めたりすることができます。

子宮を温める「温活」。

生理痛時に身体をじんわり温めます。

産後の会陰切開の痛み、痔の痛みには冷凍庫で冷やして使えます。

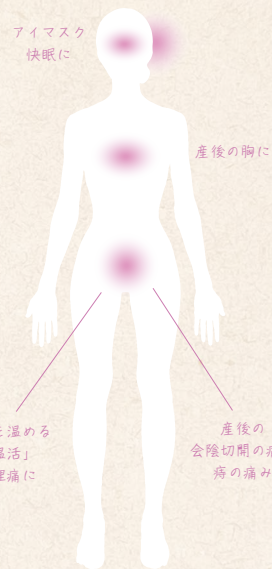

ふんわりと肌に優しい専用カバー

綿 100%

パープル グレー

保管用のチャック袋付き

電子レンジで温めるための不織布袋付き

■材質 (内容物)水、不凍液、調整剤、CMC、防腐剤、着色剤、(本体袋)ナイロン、ポリエチレン、(カバー)綿100%

鈴蘭 suzuran

5連結 HOT & COOL パック

■品番 Lul-001

■サイズ W100×H550mm

■重量 約600g

■JANコード パープル:4978797400371

グレー :4978797400340

■定価 ¥2,700 (税別)

向日葵 himawari

まめ型 HOT & COOL パック

■品番 Lul-002

■サイズ W90×H185mm

■重量 約120g

■JANコード パープル:4978797400357

グレー :4978797400326

■定価 ¥2,250 (税別)

桔梗 kikyo

陰部用 HOT & COOL パック

■品番 Lul-003

■サイズ W70×H180mm

■重量 約90g

■JANコード パープル:4978797400364

グレー :4978797400333

■定価 ¥2,250 (税別)

mie 三重化学工業株式会社

〒515-0001 三重県松阪市大口町255-1
TEL 0598-51-2361 FAX 0598-51-1143
<https://www.miekagaku.co.jp/>



三重化学工業の開発モノ語り

三重化学工業で初の
フェムテック製品「ラルル」の
商品開発ストーリー



医療機器メーカーが考えた
女性のためのケアグッズ



ラルル
Lulle
HOT & COOL PACK
series

「ラルル」シリーズ
紹介動画はこちら



子宮やお腹、背中の温めに

パープル



グレー

suzuran

鈴蘭

5連結 HOT & COOL PACK

子宮、背中、首、肩、手首、足首、胸などを冷やしたり温めたりすることができます。急な発汗時にも使えます。



5連結パック



ジェルパックに取扱方法がプリントされています



カバーにパックを入れて使います



5連結の長いパックが肩やお腹を包みこむ

- Cool** 冷凍庫で3時間以上冷却してください
- Hot** 70℃前後のお湯で10分湯煎してください
推奨は湯煎加熱ですが、電子レンジでの温めも出来ます

耳の後ろや産後の胸に

パープル



グレー

himawari

向日葵

まめ型 HOT & COOL PACK

耳の後ろを温めて快眠を促し、アイマスクとしても使えます。胸やリンパにもフィットする形状です。急な発汗時にも使えます。




まめ型パック



ジェルパックに取扱方法がプリントされています



カバーにパックを入れて使います

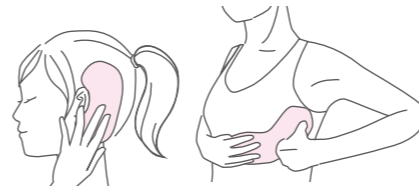

耳の後ろに

温めて胸やリンパに

- Cool** 冷凍庫で3時間以上冷却してください
- Hot** 電子レンジ 500W又は600Wで30秒加熱してください

デリケートゾーンの痛みに

パープル



グレー

kikyo

桔梗

陰部用 HOT & COOL PACK

子宮を温める「温活」、生理痛時に。身体をじんわり温めます。冷やして産後の会陰切開や痔の痛みにも使えます。





陰部用パック



ジェルパックに取扱方法がプリントされています



カバーにパックを入れて使います

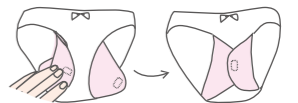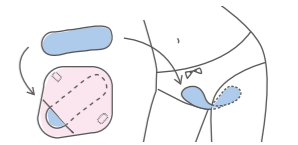

パックをカバーに入れてショーツにセット

- Cool** 冷凍庫で3時間以上冷却してください
- Hot** 電子レンジ 500W又は600Wで20秒加熱してください